

Der Ortho Rehab Total

Der Ortho Rehab Total stabilisiert optimal, erleichtert die Abrollung, entlastet die Achillessehne und erlaubt eine frühfunktionelle Therapie, die den Heilungsprozess fördert und schneller mobil macht.

De facto die beste Therapie für Ihre Achillessehnen – Verletzung

Vorteile

▪ Optimale Stabilisierung

Das Künzli Ortho® Stabilsystem stabilisiert das Sprunggelenk optimal während dem Heilungsprozess und limitiert die Innen – und Aussenrotation.

▪ Frühfunktionelle Behandlung

Die hohe Stabilität des Ortho Rehab Total erlaubt eine frühe Vollbelastung im Schuh ohne Gefährdung der Sehnenheilung. Dadurch beschleunigt die frühfunktionelle Therapie die Heilung und beugt Knochen- und Muskelschwund vor.

▪ Erhalt des physiologischen Gangbildes

Durch das Paar getragene Künzli Achillesschuhe bleibt die Körperstatik erhalten und Fehlstellungen werden während der Behandlung vermieden.

▪ Achillessehnen Entlastung

Die Keilversorgung und die Spezialsohle erleichtern die Abrollung und minimieren den Zug auf die Achillessehne.

Gebrauchsanweisung

▪ Vordereinstieg


Öffnen Sie die Schnürung und klappen Sie die Lasche soweit wie möglich nach vorne. Schlüpfen Sie vorsichtig in die Schuhe, schieben Sie die Ferse sanft nach hinten, zentrieren Sie die Lasche und schnüren Sie den Schuh gut fest. Verknüpfen Sie die Schnürsenkel stets sorgfältig und schliessen Sie immer sämtliche Klettverschlüsse, damit diese später nicht zur Stolperfalle werden.

▪ Hintereinstieg

Öffnen Sie die Klettverschlüsse der Schuhe vor dem Einsteigen vollständig und klappen Sie die fersenseitige Lasche soweit wie möglich zurück. Schlüpfen Sie vorsichtig in die Schuhe und verschliessen Sie die Klettverschlüsse. Der Hintereinstieg hilft Ihnen, den Fuss wenn nötig auch beim Anziehen der Schuhe in der Spitzfuss-Stellung zu halten.

▪ Keilversorgung

Mit dem Ortho Rehab Total werden zwei Paar mitgeliefert: Dick [1], Dünn [2]. Diese werden unter die Decksohle [3] in den Schuh eingelegt. Diese dienen bei einer konservativen Behandlung zur Ruhigstellung der Sehne und nach einer Operation zur Schonung der Wundheilung. Halten Sie sich bezüglich Tragdauer an die Anweisungen Ihres Arztes.

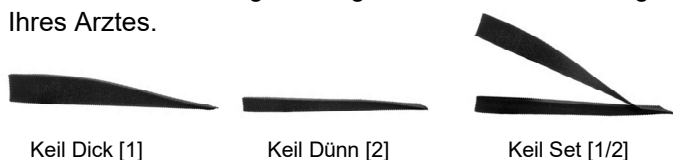

Der Ortho Rehab Total in Kürze



Pflegeanweisung

▪ Reinigen

Reinigen Sie leicht verschmutzte Schuhe mit einer Bürste oder einem feuchten Lappen, starke Verschmutzungen mit einer Bürste unter fliessendem Wasser. Befreien Sie auch die Sohle von Steinen und Schmutz.

▪ Trocknen

Trocknen Sie Ihre Schuhe nie direkt in der Sonne, an Heizungen oder anderen Wärmequellen. Stopfen Sie die Schuhe stattdessen mit Zeitungspapier aus und lassen Sie sie bei Zimmertemperatur trocknen. Dies verhindert, dass das Leder hart und brüchig wird.

▪ Imprägnieren

Imprägnieren Sie Ihre Schuhe in regelmässigen Abständen mit einem für Leder geeigneten Imprägnierspray.

▪ Wachsen

Damit Glattleder elastisch und weich bleibt, sollten Sie von Zeit zu Zeit Schuhcreme und/oder Schuhwachs auftragen. Zum Einreiben und Polieren verwenden Sie am besten ein feines Tuch. Polieren Sie den Schuh bis das Leder wieder glänzt.

