

# Ortho® Keilversorgung

Versorgungskonzept für die Achillessehnenmodelle

ortho®  
künzli.



## Qualitätsmerkmale

- Konservative oder postoperative Behandlung
- Gewährleistung der Spitzfuss-Stellung
- Zwei unterschiedlich hohe Keilpaare
- Fördert ein symmetrisches Gangbild
- Ergonomisch optimierte Fussform

## Grösse

UK 6 - 15 (nur ganze Grössen)

Schuhgrösse		Dicker Keil	Dünnere Keil
UK 3 - 6 (weisse Keile)	Höhe	20 mm	10 mm
	Länge	160 mm	170 mm
UK 7 - 10 (graue Keile)	Höhe	25 mm	15 mm
	Länge	180 mm	190 mm
UK 11 -15 (schwarze Keile)	Höhe	25 mm	15 mm
	Länge	190 mm	200mm



## Funktion

Gewährleistung der **Spitzfuss-Stellung** und somit **Entlastung** der Achillessehne.  
Erlaubt **frühfunktionelle Mobilisation**

## Achillessehnenmodelle

Ortho Rehab Absolut (rechts und links)  
Ortho Rehab Total  
Ortho Rehab Total Max

## Merkmale

**Zwei Keilpaare** in unterschiedlichen Höhen (dick und dünn)  
Spezifisch **geformte** Keile, die individuell auf die **rechte und linke Seite** angepasst sind, mit klarer Kennzeichnung  
Ergonomische Anpassung an die natürliche **Fussform**  
Fördert ein **symmetrisches Gangbild** und verhindert Hüftschiefstände.  
Möglichkeit, zusätzlich einen Gips zu tragen (24h Schutz)

## Material

EVA (schockabsorbierend)

## Versorgungskonzept

Jedem Paar Achilleschuhe liegen zwei Keilpaare bei: jeweils ein dicker und ein dünner Keil für jede Schuhseite. Entsprechend dem Heilungsverlauf erfolgt die **Keilversorgung in vier Phasen** mit einer **schrittweisen Reduzierung** der Höhe:

### Phase 1



### Phase 2



### Phase 3



### Phase 4

